

VEERA FORTE pończochy uciskowe II klasa ucisku otwarte krótkie czarne



Cena od: 104,99 zł

Opis produktu

Pończochy uciskowe VEERA Forte II klasa ucisku to miękkie, komfortowe pończochy kompresyjne produkowane przy użyciu zaawansowanych technologii i najwyższej jakości wykończenia. Produkt jest kryjący, ma właściwości antybakteryjne, antygrzybicze, antyalergiczne i antyzapachowe.

SZCZEGÓŁY:

KLASA KOMPRESJI: II (23-32 mmHg)

SKŁAD: 76% poliamid, 24% lycra

WERSJA: Palce otwarte

WYKOŃCZENIE MANKIETU: Lamówka

DŁUGOŚĆ: Krótka

KOLOR: Czarne

OPAKOWANIE: 1 para

Mechanizm działania kompresyjnych wyrobów medycznych polega na działaniu precyzyjnie określonego stopniowanego ucisku na kończynę dolną, który stopniowo zmniejsza się od kostki w kierunku serca. Ciśnienie w okolicy kostki jest najwyższe i

osięga wartości 23 – 32 mmHg.

JAK DOBRA? ODPOWIEDNI ROZMIAR?

Pomiary należy dokonywać na nieobrzękniętej kończynie. Dopasowanie stopnia ucisku ma bardzo duże znaczenie. Nie może on być zbyt delikatny, ponieważ będzie nieskuteczny. Z kolei zbyt silny ucisk może spowodować upośledzenie przepływu krwi w tętnicach kończyn dolnych. Należy zmierzyć obwody nóg oraz ich długość we wskazanych poniżej punktach i porównać z tabelami rozmiarowymi poniżej.

SPOSÓB ZAKŁADANIA:

Nakładanie uciskowych produktów medycznych zaleca się rano (przed wstaniem z łóżka) w pozycji leżącej. Zakładanie należy rozpocząć od palców do kostki, rozprowadzając przy tym materiał równomiernie na stopie. Trzeba zwrócić uwagę na dokładne umieszczenie piąty. Po nałożeniu do kolana, dokładnie rozprowadzić na łydce zmniejszając nieco napięcie wynikające z nakładania. Na koniec wygładzić wszystkie zgrubienia i zmarszczenia. Aby zapobiec przetarciom i uszkodzeniom produktu, należy pielęgnować piąty, nosić właściwe obuwie oraz pilnować, by nie zahaczył produktu czymś ostrym.

WSKAZANIA:

- lekka niewydolność żylna
- przewlekła niewydolność żylna
- zakrzepowe zapalenie żył
- zakrzepica żył powierzchniowych (przy obrzękach lub bez)
- stany po skleroterapii
- po operacji żyłaków i po strippingu
- żyłaki pojawiające się w okresie ciąży
- profilaktyka zatorów
- profilaktyka zakrzepicy

PRZECIWSKAZANIA:

- ostre zapalenie tkanki podskórnej
- infekcje skórne
- obliteracja arteriopatii obwodowa
- stwierdzona alergia na skład wyrobu

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.

Warianty produktu



Rozmiar 1 Krótkie

Rozmiar 1 Krótkie

104,99 zł



Rozmiar 2 Krótkie

Rozmiar 2 Krótkie

104,99 zł



Rozmiar 3 Krótkie

Rozmiar 3 Krótkie

104,99 zł



Rozmiar 4 Krótkie

Rozmiar 4 Krótkie

104,99 zł



Rozmiar 5 Krótkie

Rozmiar 5 Krótkie

104,99 zł

Galeria

