

VEERA podkolanówki uciskowe 140 DEN KARMELOWY



Cena od: 38,69 zł

Opis produktu

Podkolanówki uciskowe VEERA I klasa ucisku 140 DEN to najwyższej klasy eleganckie podkolanówki. Poprawiają krążenie i perfekcyjnie modelują nogi. Podkolanówki w I klasie ucisku stosujemy profilaktycznie i przy pierwszych problemach z krążeniem. Produkt jest po to by nadać ulgę zmęczonym nogom, poprawia krążenie, zmniejsza obrzęk i uczucie ciężkich nóg. Są testowane klinicznie, uszyte w specjalnym splocie plastra miodu, by zminimalizować ryzyko "puszczenia oczka". Posiadają wzmocnione palce oraz piętę. Wyprodukowane w technologii Silver + z dodatkiem jonów srebra.

SZCZEGÓŁY:

KLASA KOMPRESJI: I (18-21 mmHg)

SKŁAD: 78% poliamid, 22% elastan

WERSJA: Palce zamknięte

WYKOŃCZENIE MANKIETU: Lamówka

KOLOR: Karmelowy

OPAKOWANIE: 1 para

Mechanizm działania kompresyjnych wyrobów medycznych polega na działaniu precyzyjnie określonego stopniowanego ucisku na kończynę dolną, który stopniowo

zmniejsza się od kostki w kierunku serca. Ciężnienie w okolicy kostki jest największe i osiąga wartości 18 – 21 mmHg.

JAK DOBRA? ODPOWIEDNI ROZMIAR?

Podkolanówki Veera dobieramy na rozmiar stopy.

SPOSÓB ZAKŁADANIA:

Nakładanie uciskowych produktów medycznych zaleca się rano (przed wstaniem z łóżka) w pozycji leżącej. Zakładanie należy rozpocząć od palców do kostki, rozprowadzając przy tym materiały równomiernie na stopie. Trzeba zwrócić uwagę na dokładne umieszczenie piąty. Po nałożeniu do kolana, dokładnie rozprowadzić na łydce zmniejszając nieco napięcie wynikające z nakładania. Na koniec wygładzić wszystkie zgrubienia i zmarszczenia. Aby zapobiec przetarciom i uszkodzeniom produktu, należy pielęgnować piąty, nosić właściwe obuwie oraz pilnować, by nie zahaczył produktu czymś ostrym.

WSKAZANIA:

- uczucie bólu, zmęczenia i ciężkości nóg
- pajęczki
- łyłaki
- przewlekła choroba łylna
- obrzęki i łyłaki w ciąży
- profilaktycznie
- zakrzepica podczas podróży

PRZECIWSKAZANIA:

- ucięśliwe sęczenie się uszkodzenia skóry
- ostre niedokrwienie kończyn
- krytyczne niedokrwienie kończyn
- zdekompensowana niewydolność serca
- bolesny obrzęk siniczny i bolesny obrzęk biały
- nadwrażliwość na użyte materiały
- zaburzenia czucia kończyn (np. neuropatia obwodowa w cukrzycy)

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.

Warianty produktu



Rozmiar 1/2 35-38

38,69 zł

Rozmiar 1/2 35-38



Rozmiar 3/4 39-41

38,69 zł

Rozmiar 3/4 39-41

Galeria

