

## VEERA podkolanówki uciskowe 70 DEN NATURALNY



Cena od: 31,00 zł

### Opis produktu

**Podkolanówki VEERA z uciskiem profilaktycznym 70 DEN** to najwyższej klasy eleganckie podkolanówki. Poprawiają krążenie i perfekcyjnie modelują nogi. Podkolanówki z uciskiem profilaktycznym stosujemy gdy mamy zmęczone nogi, gdy pod koniec dnia czujemy w nich ból oraz mamy obrzęk, który ustępuje po przespanej nocy. Produkt jest po to by nadać ulgę zmęczonym nogom, poprawia krążenie, zmniejsza obrzęk i uczucie ciężkich nóg. Są testowane klinicznie, uszyte w specjalnym splocie plastra miodu, by zminimalizować ryzyko "puszczenia oczka". Posiadają wzmocnione palce oraz pięty. Wyprodukowane w technologii Silver + z dodatkiem jonów srebra.

### SZCZEGÓŁY:

**KLASA KOMPRESJI:** profilaktyczna (13-17 mmHg)

**SKŁAD:** 78% poliamid, 22% elastan

**WERSJA:** Palce zamknięte

**WYKOŃCZENIE MANKIETU:** Lamówka

**KOLOR:** Naturalny

**OPAKOWANIE:** 1 para

Mechanizm działania kompresyjnych wyrobów medycznych polega na działaniu

precyzyjnie określonego stopniowanego ucisku na kośćczynę dolną, który stopniowo zmniejsza się od kostki w kierunku serca. Ciśnienie w okolicy kostki jest najwyższe i osiąga wartości 13 – 17 mmHg.

## JAK DOBRA? ODPOWIEDNI ROZMIAR?

Podkolanówki Veera dobieramy na rozmiar stopy.

## SPOSÓB ZAKŁADANIA:

Nakładanie uciskowych produktów medycznych zaleca się rano (przed wstaniem z łóżka) w pozycji leżącej. Zakładanie należy rozpocząć od palców do kostki, rozprowadzając przy tym materiały równomiernie na stopie. Trzeba zwrócić uwagę na dokładne umieszczenie piąty. Po nałożeniu do kolana, dokładnie rozprowadzić na łydce zmniejszając nieco napięcie wynikające z nakładania. Na koniec wygładzić wszystkie zgrubienia i zmarszczenia. Aby zapobiec przetarciom i uszkodzeniom produktu, należy pielęgnować piąty, nosić w odpowiednim obuwiu oraz pilnować, by nie zahaczył produktu czymś ostrym.

## WSKAZANIA:

- uczucie bólu, zmęczenia i ciężkości nóg
- profilaktycznie
- bólce i spuchnięte nogi (obrzęk w okolicy kostki ustępujący po przespanej nocy)

## PRZECIWSKAZANIA:

- uciążliwe schyłkowe uszkodzenia skóry
- ostre niedokrwienie kończyn
- krytyczne niedokrwienie kończyn
- zdekompensowana niewydolność serca
- bolesny obrzęk siniczny i bolesny obrzęk biały
- nadwrażliwość na użyte materiały
- zaburzenia czucia kończyn (np. neuropatia obwodowa w cukrzycy)

## TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.

### Warianty produktu



Rozmiar 1/2 35-38

31,00 zł

Rozmiar 1/2 35-38



Rozmiar 3/4 39-41

31,00 zł

Rozmiar 3/4 39-41

## Galeria

