

## VEERA pończochy uciskowe 140 DEN JASNY ORZECH

Cena od: 86,60 zł



### Opis produktu

**Pończochy uciskowe VEERA I klasa ucisku 140 DEN** to najwyższej klasy eleganckie pończochy. Poprawiają krążenie i perfekcyjnie modelują nogi. Pończochy w I klasie ucisku stosujemy profilaktycznie i przy pierwszych problemach z krążeniem. Produkt jest po to by nadać ulgę zmęczonym nogom, poprawia krążenie, zmniejsza obrzęk i uczucie ciężkich nóg. Są testowane klinicznie, uszyte w specjalnym splotu plastra miodu, by zminimalizować ryzyko "puszczenia oczka". Dzięki użyciu splotu plastra miodu, wyrób zachowuje min. 6 miesięcy swoje właściwości uciskowe. Posiadają wzmocnione palce oraz piętę. Wyprodukowane w technologii Silver + z dodatkiem jonów srebra.

### SZCZEGÓŁY:

**KLASA KOMPRESJI:** I (18-21 mmHg)

**SKŁAD:** 78% poliamid, 22% elastan

**WERSJA:** Palce zamknięte

**WYKOŃCZENIE MANKIETU:** Koronka

**KOLOR:** Jasny orzech

**OPAKOWANIE:** 1 para

Mechanizm działania kompresyjnych wyrobów medycznych polega na działaniu

precyzyjnie określonego stopniowanego ucisku na kośćczynę dolną, który stopniowo zmniejsza się od kostki w kierunku serca. Ciśnienie w okolicy kostki jest najwyższe i osiąga wartości 18 – 21 mmHg.

### JAK DOBRA? ODPOWIEDNI ROZMIAR?

W celu prawidłowego doboru rozmiaru należy porównać swoją wagę oraz wzrost z tabelą poniżej:

**Rozmiar 1/2** WAGA 46-60 kg WZROST 150-173 cm

**Rozmiar 3** WAGA 61-69 kg WZROST 161-179 cm

**Rozmiar 4** WAGA 70-78 kg WZROST 158-180 cm

**Rozmiar 5** WAGA 68-91 kg WZROST 168-180 cm

### SPOSÓB ZAKŁADANIA:

Nakładanie uciskowych produktów medycznych zaleca się rano (przed wstaniem z łóżka) w pozycji leżącej. Zakładanie należy rozpocząć od palców do kostki, rozprowadzając przy tym materiały równomiernie na stopie. Trzeba zwrócić uwagę na dokładne umieszczenie piąty. Po nałożeniu do kolana, dokładnie rozprowadzić na łydce zmniejszając nieco napięcie wynikające z nakładania. Na koniec wygładzić wszystkie zgrubienia i zmarszczenia. Aby zapobiec przetarciom i uszkodzeniom produktu, należy pielęgnować piąty, nosić w odpowiednim obuwiu oraz pilnować, by nie zahaczył produktu czymś ostrym.

### WSKAZANIA:

- uczucie bólu, zmęczenia i ciężkości nóg
- pajęczki
- łyłaki
- przewlekła choroba łylna
- obrzęki i łyłaki w ciąży
- profilaktycznie
- zakrzepica podczas podróży

### PRZECIWSKAZANIA:

- uciśniewe uszkodzenia skóry
- ostre niedokrwienie kośćczyn
- krytyczne niedokrwienie kośćczyn
- zdekompensowana niewydolność serca
- bolesny obrzęk siniczny i bolesny obrzęk biały
- nadwrażliwość na użyte materiały
- zaburzenia czucia kośćczyn (np. neuropatia obwodowa w cukrzycy)

**TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.**

Warianty produktu



Rozmiar 1/2

86,60 zł

Rozmiar 1/2



Rozmiar 3

86,60 zł

Rozmiar 3



Rozmiar 4

86,60 zł

Rozmiar 4



Rozmiar 5

86,60 zł

Rozmiar 5

## Galeria

