

VEERA pończochy uciskowe 140 DEN SOLEI otwarte palce

Cena od: 89,76 zł



Opis produktu

Pończochy uciskowe VEERA I klasa ucisku 140 DEN z otwartymi palcami

to najwyższej klasy eleganckie pończochy. Poprawiają krążenie i perfekcyjnie modelują nogi. Pończochy w I klasie ucisku stosujemy profilaktycznie i przy pierwszych problemach z krążeniem. Produkt jest po to by nadać ulgę zmęczonym nogom, poprawia krążenie, zmniejsza obrzęk i uczucie ciężkich nóg. Są testowane klinicznie, uszyte w specjalnym splotie plastra miodu, by zminimalizować ryzyko "puszczenia oczka". Dzięki użyciu splotu plastra miodu, wyrób zachowuje min. 6 miesięcy swoje właściwości uciskowe. Posiadają wzmocnione pięty. Wyprodukowane w technologii Silver + z dodatkiem jonów srebra.

SZCZEGÓŁY:

KLASA KOMPRESJI: I (18-21 mmHg)

SKŁAD: 78% poliamid, 22% elastan

WERSJA: Palce otwarte

WYKOŃCZENIE MANKIETU: Koronka

KOLOR: Solei

OPAKOWANIE: 1 para

Mechanizm działania kompresyjnych wyrobów medycznych polega na działaniu

precyzyjnie określonego stopniowanego ucisku na kośćczynę dolną, który stopniowo zmniejsza się od kostki w kierunku serca. Ciśnienie w okolicy kostki jest najwyższe i osiąga wartości 18 – 21 mmHg.

JAK DOBRA? ODPOWIEDNI ROZMIAR?

W celu prawidłowego doboru rozmiaru należy porównać swoją wagę oraz wzrost z tabelą poniżej:

Rozmiar 1/2 WAGA 46-60 kg WZROST 150-173 cm

Rozmiar 3 WAGA 61-69 kg WZROST 161-179 cm

Rozmiar 4 WAGA 70-78 kg WZROST 158-180 cm

SPOSÓB ZAKŁADANIA:

Nakładanie uciskowych produktów medycznych zaleca się rano (przed wstaniem z łóżka) w pozycji leżącej. Zakładanie należy rozpocząć od palców do kostki, rozprowadzając przy tym materiały równomiernie na stopie. Trzeba zwrócić uwagę na dokładne umieszczenie pięt. Po nałożeniu do kolana, dokładnie rozprowadzić na łydce zmniejszając nieco napięcie wynikające z nakładania. Na koniec wygładzić wszystkie zgrubienia i zmarszczenia. Aby zapobiec przetarciom i uszkodzeniom produktu, należy pielęgnować piętę, nosić właściwe obuwie oraz pilnować, by nie zahaczył produktu czymś ostrym.

WSKAZANIA:

- uczucie bólu, zmęczenia i ciężkości nóg
- pajęczki
- łyłaki
- przewlekła choroba łylna
- obrzęki i łyłaki w ciąży
- profilaktycznie
- zakrzepica podczas podróży

PRZECIWSKAZANIA:

- uciśniewe uszkodzenia skóry
- ostre niedokrwienie kośćczyn
- krytyczne niedokrwienie kośćczyn
- zdekompensowana niewydolność serca
- bolesny obrzęk siniczny i bolesny obrzęk biały
- nadwrażliwość na użyte materiały
- zaburzenia czucia kośćczyn (np. neuropatia obwodowa w cukrzycy)

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.

Warianty produktu



Rozmiar 1/2

89,76 zł

Rozmiar 1/2



Rozmiar 3

89,76 zł

Rozmiar 3



Rozmiar 4

89,76 zł

Rozmiar 4

Galeria

