

## VEERA pończochy uciskowe 70 DEN JASNY ORZECH

Cena od: 74,99 zł



### Opis produktu

**Pończochy VEERA z uciskiem profilaktycznym 70 DEN** to najwyższej klasy eleganckie pończochy. Poprawiają krążenie i perfekcyjnie modelują nogi. Pończochy z uciskiem profilaktycznym stosujemy gdy mamy zmęczone nogi, gdy pod koniec dnia czujemy w nich ból oraz mamy obrzęk, który ustępuje po przespanej nocy. Produkt jest po to by nadać ulgę zmęczonym nogom, poprawia krążenie, zmniejsza obrzęk i uczucie ciężkich nóg. Są testowane klinicznie, uszyte w specjalnym splocie plastra miodu, by zminimalizować ryzyko "puszczenia oczka". Posiadają wzmocnione palce oraz piętę. Wyprodukowane w technologii Silver + z dodatkiem jonów srebra.

### SZCZEGÓŁY:

**KLASA KOMPRESJI:** profilaktyczna (13-17 mmHg)

**SKŁAD:** 78% poliamid, 22% elastan

**WERSJA:** Palce zamknięte

**WYKOŃCZENIE MANKIETU:** Koronka

**KOLOR:** Jasny orzech

**OPAKOWANIE:** 1 para

Mechanizm działania kompresyjnych wyrobów medycznych polega na działaniu precyzyjnie określonego stopniowanego ucisku na kończynę dolną, który stopniowo

zmniejsza się od kostki w kierunku serca. Ciężnienie w okolicy kostki jest najwyższe i osiąga wartości 13 – 17 mmHg.

### JAK DOBRA? ODPOWIEDNI ROZMIAR?

W celu prawidłowego doboru rozmiaru należy porównać swoją wagę oraz wzrost z tabelą poniżej:

Rozmiar 1/2 WAGA 49-60 kg WZROST 150-173 cm

Rozmiar 3 WAGA 61-69 kg WZROST 161-179 cm

Rozmiar 4 WAGA 70-78 kg WZROST 158-180 cm

Rozmiar 5 WAGA 68-91 kg WZROST 168-180 cm

### SPOSÓB ZAKŁADANIA:

Nakładanie uciskowych produktów medycznych zaleca się rano (przed wstaniem z łóżka) w pozycji leżącej. Zakładanie należy rozpocząć od palców do kostki, rozprowadzając przy tym materiał równomiernie na stopie. Trzeba zwrócić uwagę na dokładne umieszczenie piąty. Po nałożeniu do kolana, dokładnie rozprowadzić na łydce zmniejszając nieco napięcie wynikające z nakładania. Na koniec wygładzić wszystkie zgrubienia i zmarszczenia. Aby zapobiec przetarciom i uszkodzeniom produktu, należy pielęgnować piąty, nosić właściwą obuwie oraz pilnować, by nie zahaczył produktu czymś ostrym.

### WSKAZANIA:

- uczucie bólu, zmęczenia i ciężkości nóg
- profilaktycznie
- bólce i spuchnięte nogi (obrzęk w okolicy kostki ustępujący po przespanej nocy)

### PRZECIWSKAZANIA:

- uciążliwe 상처ce skóry uszkodzenia skóry
- ostre niedokrwienie kończyn
- krytyczne niedokrwienie kończyn
- zdekompensowana niewydolność serca
- bolesny obrzęk siniczny i bolesny obrzęk biały
- nadwrażliwość na użyte materiały
- zaburzenia czucia kończyn (np. neuropatia obwodowa w cukrzycy)

**TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.**

Warianty produktu



Rozmiar 1/2

74,99 zł

Rozmiar 1/2



Rozmiar 3

74,99 zł

Rozmiar 3



Rozmiar 4

74,99 zł

Rozmiar 4



Rozmiar 5

74,99 zł

Rozmiar 5

## Galeria

