

## VEERA rajstopy uciskowe 140 DEN CZARNY

Cena od: 65,00 zł



### Opis produktu

**Rajstopy uciskowe VEERA I klasa ucisku 140 DEN** to najwyższej klasy eleganckie rajstopy. Poprawiają krążenie i perfekcyjnie modelują nogi. Rajstopy w I klasie ucisku stosujemy profilaktycznie i przy pierwszych problemach z krążeniem. Produkt jest po to by nadać ulgę zmęczonym nogom, poprawia krążenie, zmniejsza obrzęk i uczucie ciężkich nóg. Są testowane klinicznie, uszyte w specjalnym splotu plastra miodu, by zminimalizować ryzyko "puszczenia oczka". Dzięki użyciu splotu plastra miodu, wyrób zachowuje min. 6 miesięcy swoje właściwości uciskowe. Posiadają wzmocnione palce oraz piętę. Wyprodukowane w technologii Silver + z dodatkiem jonów srebra.

### SZCZEGÓŁY:

**KLASA KOMPRESJI:** I (18-21 mmHg)

**SKŁAD:** 78% poliamid, 22% elastan

**WERSJA:** Palce zamknięte

**KOLOR:** Czarny

**OPAKOWANIE:** 1 para

Mechanizm działania kompresyjnych wyrobów medycznych polega na działaniu precyzyjnie określonego stopniowanego ucisku na kośćczynek dolny, który stopniowo

zmniejsza się od kostki w kierunku serca. Ciężnienie w okolicy kostki jest największe i osiąga wartości 18 – 21 mmHg.

### JAK DOBRA? ODPOWIEDNI ROZMIAR?

W celu prawidłowego doboru rozmiaru należy porównać swoją wagę oraz wzrost z tabelą poniżej:

**Rozmiar 1** WAGA 44-52 kg WZROST 150-158 cm

**Rozmiar 2** WAGA 52-62 kg WZROST 158-164 cm

**Rozmiar 3** WAGA 62-70 kg WZROST 164-170 cm

**Rozmiar 4** WAGA 70-82 kg WZROST 164-176 cm

**Rozmiar 5\*** WAGA 80-90 kg WZROST 170-182 cm

\*z dużym klinem

### SPOSÓB ZAKŁADANIA:

Nakładanie uciskowych produktów medycznych zaleca się rano (przed wstaniem z łóżka) w pozycji leżącej. Zakładanie należy rozpocząć od palców do kostki, rozprowadzając przy tym materiał równomiernie na stopie. Trzeba zwrócić uwagę na dokładne umieszczenie piąty. Po nałożeniu do kolana, dokładnie rozprowadzić na łydce zmniejszając nieco napięcie wynikające z nakładania. Na koniec wygładzić wszystkie zgrubienia i zmarszczenia. Aby zapobiec przetarciom i uszkodzeniom produktu, należy pielęgnować piąty, nosić właściwe obuwie oraz pilnować, by nie zahaczył produktu czymś ostrym.

### WSKAZANIA:

- uczucie bólu, zmęczenia i ciężkości nóg
- pajęczki
- łyłaki
- przewlekła choroba łylna
- obrzęki i łyłaki w ciąży
- profilaktycznie
- zakrzepica podczas podróży

### PRZECIWSKAZANIA:

- ucięliwe sęczęce sę uszkodzenia skóry
- ostre niedokrwienie kończyn
- krytyczne niedokrwienie kończyn
- zdekompensowana niewydolność serca
- bolesny obrzęk siniczny i bolesny obrzęk biały
- nadwrażliwość na użyte materiały
- zaburzenia czucia kończyn (np. neuropatia obwodowa w cukrzycy)

**TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.**

Warianty produktu



Rozmiar 1

Rozmiar 1

65,00 zł



Rozmiar 2

Rozmiar 2

65,00 zł



Rozmiar 3

Rozmiar 3

65,00 zł



Rozmiar 4

Rozmiar 4

65,00 zł



Rozmiar 5

Rozmiar 5

65,00 zł

## Galeria

